

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ирригационный набор для оборудования

Таблица совместимости

270601	1/2Y	Suni 2000-3000, Suni Max, BR 3000, BR 4000, Sky Unit, Surgi Set Basic, Surgi Set Pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, XO Osseo, Osseo System
270602	1/2Y	Elcomed 100, Astratech 100, Elcomed 100, Elcomed 200
270603	V/2Y	PhysioPlus, 3000 Krugg, 3000 New, 3000 Plus, Physiodispenser 3000, Implant Surgery System, Steri Oss
270604	1	MD 10, MD 10S, MD 20, SEM 2, SU 100, CBM, MD 7000, MD 8000, TCM 3000, Assistant 2
270606	1/2Y	Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant, Implantology surgical, Oral Max System
270607	1/2Y	INTRAssept 905, Piezosurgery II, Piezosurgery 3
270609	1/2Y	AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2, Piezo Surgical System, Delfin, Implantor Neo, Ki-20, Surgic Pro, Surgic XT, Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision
270610	1/2Y T	Implantmed, Implantmed SI-923, iCTmotor, Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare, Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI-923, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed SA-320, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech
270613	1	Implanteo, Implanteo Led
270616	1/2Y T	Frios Unit E, Elcomed SA-200C
270617	1/2Y	INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air
270618	1/2Y	Chiropro 980, Osseo Doc, Easy Surgery, MyTUTOR, Riunito Cefla, Piezon Master Surgery, Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto, TMM2, Riunito Planmeca, Acrobone, Easybone 4, Surgybone, Prosurgy, Spin, Heracle, Ultrasonic Bone Surgery
270619	1	Silfradent
270621	1	MASTERSurg, EXPERTSurg
270622	1	Nouvag Physiodispenser 2000
270623	1	Implantmed, Implantmed SI-923, iCTmotor, Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare, Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI-923, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed SA-320, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech
270624	1/2Y	Piezosurgery Touch, Piezosurgery White
270625	1	AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2, Piezo Surgical System, Delfin, Implantor, Ki-20, Surgic Pro, Surgic XT, Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision
270626	1	Удлинительная трубка для механической ирригации

Пояснения:

1 – внутренняя односторонняя ирригация

1/2Y – двусторонняя внутренняя и внешняя ирригация с помощью встроенного Y-соединения

T – нажать для соединения другой ирригационной трубки

 <p>Не использовать повторно</p>	 <p>Номер партии</p>	 <p>Производитель</p>
 <p>Срок годности</p>	 <p>Беречь от влаги</p>	 <p>Не стерилизовать</p>
 <p>Апирогенный</p>	 <p>Не использовать при поврежденной упаковке</p>	 <p>Хранить вдали от источников тепла</p>
 <p>Стерилизовано этилен-оксидом</p>	 <p>Следовать инструкции по эксплуатации</p>	 <p>Каталожный номер (артикул)</p>
 <p>0123 Идентификационный номер нотифицированного органа сертификации</p>		

Набор для ирригации для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости во время стоматологической хирургической операции.

Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов.

Инструкция по применению:

1. Снимите колпачок с иголки.
2. Вставьте иголку в пакет (с охлаждающей жидкостью) и соедините ирригационную систему с помощью крепления типа Люэр-лок. Иголка имеет воздушный фильтр системой открытия-закрытия, что позволяет регулировать скорость потока.
3. При необходимости используйте роллер, чтобы отрегулировать скорость потока.
4. Вставьте трубку в перистальтическую помпу, внимательно следя за направлением движения потока и используя специальные соединения на концах силиконовой трубки.
5. Если она оборудована краном, соедините концевое удлинение и отрегулируйте направление потока.
6. Ирригационные системы предлагают следующие варианты:
 - a. односторонняя внутренняя ирригация
 - b. односторонняя внешняя ирригация
 - c. двусторонняя внутренняя и внешняя ирригация с помощью встроенного Y-соединения
7. Закрепите ирригационную трубку к трубке наконечника с помощью предоставленных зажимов.

Наборы для ирригации стерилизованы этилен-оксидом и предназначены только для одноразового применения.

Не стерилизовать. Не использовать повторно.

Хранить в чистом, сухом месте, защищая от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла.

После использования утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченный представитель производителя "ALLE S.r.l."
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и
эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:

ООО "Белэксподент"

220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240

Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99,

email: belexpodent@yandex.by

web: belexpodent.by

