

## Инструкция по применению

Рамки (пластиковые и металлические) используются для растяжения и фиксации на них платка коффердама.

### Рамка пластиковая Hygenic Ostby Plastic Frame



### Рамка пластиковая Hygenic Dental Dam Plastic Frame



Поместите платок коффердама на рамку, растяните его и зафиксируйте на одиннадцати зубцах рамки.

1. Пластиковая обрабатывается методом холодной дезинфекции растворами.
2. Рамка служит для многократного применения. Паровая стерилизация 4 минуты при 134°C в автоклаве класса В. Рамка должна быть простерилизована перед первым применением. Также после стерилизации перед хранением, убедитесь, что она полностью сухая.
3. Рамка не имеет срока годности и заменяется в случае механического износа или поломки.
4. Рамка рентгеноконтрастна.

### Рамка металлическая Hygenic Metal Dental Frame



Поместите платок коффердама на рамку, растяните его и зафиксируйте на одиннадцати зубцах рамки.

1. Рамка служит для многократного применения. Паровая стерилизация 4 минуты при 134°C в автоклаве класса В. Рамка должна быть простерилизована перед первым применением. Также после стерилизации перед хранением, убедитесь, что она полностью сухая. Применение сухожаровых стерилизаторов недопустимо.
2. Рамка не имеет срока годности и заменяется в случае механического износа или поломки.

Уполномоченный представитель производителя "Coltene/Whaledent Inc."  
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:

**ООО "Белэксподент"**

220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240

Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99,

email: belexpodent@yandex.by